



Deutsch

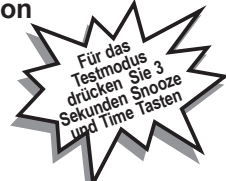

Sonic Boom Wecker mit Bettvibration

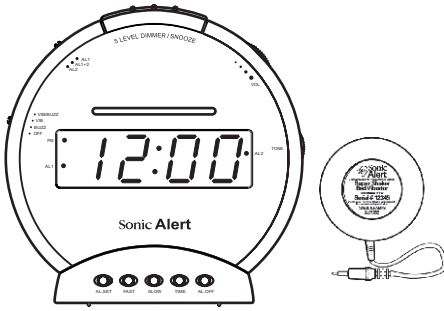

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG --Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Siehe Bedienungsanleitung auf der Rückseite.

--Verwenden Sie zum Anschließen des Geräts nur den mitgelieferten Adapter.

Warnung: Um die Gefahr eines Brandes oder Elektroschocks zu vermeiden, dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, muss gewährleistet sein, dass die am Gerät angegebenen Anforderungen der verfügbaren Stromquelle entsprechen, d.h. 100 – 240 V ~.

-- Die Lüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie einer Zeitung, Tüchern, Vorhängen usw. blockiert werden.

-- Auf das Gerät keine Quellen offener Flammen wie z. B. Kerzen stellen.

-- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät stellen.

-- Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ausreichende Lüftung stellen.

-- Wenn der Netzstecker als Trenngerät verwendet wird, muss das Trenngerät weiterhin betriebsbereit bleiben.

ALLGEMEINE DATEN

Leistungsaufnahme: Adapter DC 9V 650 mA

Für die USA UL-gelisteter Transformator (Underwriters Laboratories)

Für Europa zugelassener CE-Transformator

Testmodus:

- Drücken und halten Sie die Schlummer- und Uhrzeitasten 3 Sekunden lang, um den Testmodus aufzurufen. Auf der Anzeige erscheint "7ES7" um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Testmodus befindet.
- Wird innerhalb von einer Minute keine Taste betätigt, endet der Testmodus nach Ablauf einer Minute und die Uhr kehrt in den Uhrzeitmodus zurück.
- Drücken Sie innerhalb einer Minute eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeitasten, die wirkungslos sind), um den Testmodus sofort zu beenden.
- Wird während des Testmodus der Funktionsschalter verschoben, werden die verschiedenen Funktionen der Uhr aufgezigt:
 - Funktionsschalter auf OFF - dauerhafter Piepton, der den Testmodus anzeigt.
 - Funktionsschalter auf BUZZ demonstriert den Summertönen.
 - Funktionsschalter auf VIB demonstriert die Vibration.
 - Funktionsschalter auf VIB & BUZZ demonstriert den Summertönen und den Vibrator.
- Klicken Sie nach Beendigung des Testmodus auf eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeitasten, die wirkungslos sind), um den Testmodus sofort zu beenden.

Für Modell:


SBB500SS

SBB500SSBLK

SBB500SST / P / B / R

SBC575SS

GEBRAUCHSANLEITUNG WECKER MIT BETTVIBRATOR MODELL SBB500SS-v3

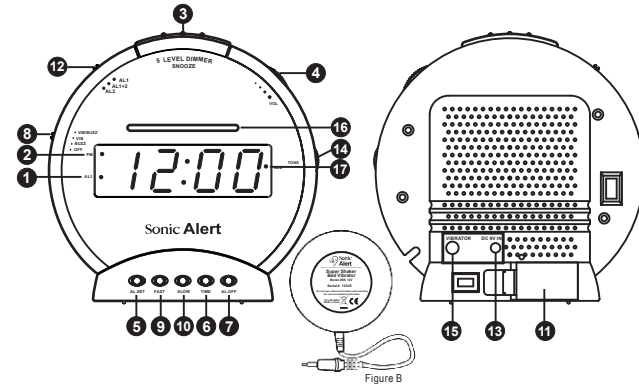

Auf Abbildung oben dargestellte Funktionen:

- | | |
|---|--|
| 1) Weckruf-Indikator | 9) Schnell Min./Studentaste/Wahl-taste 12/24 h |
| 2) PM-Indikator | 10) Langsam Min./ Studententaste |
| 3) Schlummertaste / Einstellen der Schlummerzeit / Dimmer | 11) Batteriefach |
| 4) Lautstärkeregler | 12) Weckrufwählschalter |
| 5) Alarm Set/ Einstellen der Alarmdauer | 13) Netzadapter |
| 6) Time Set-Taste | 14) Wecktonregler |
| 7) Weckruf-Off-Taste | 15) Vibrationsausgabe |
| 8) Weckruf-Funktionsschalter | 16) Blinkende Leuchtanzeige |
| | 17) Weckruf-Indikator 2 |

Einstellen der korrekten Uhrzeit –

- Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste (6)** und drücken Sie **gleichzeitig die Studententaste (9)**, um die Uhrzeitanzeige auf die gewünschte Zeit vorzustellen.
- Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste (6)** und drücken Sie **gleichzeitig die Minutentaste (10)**, um die Uhrzeitanzeige auf die gewünschte Zeit vorzustellen. Ein Leuchtpunkt oben links in der Uhrzeitanzeige steht für Nachmittag (PM). Wird kein Leuchtpunkt angezeigt, bedeutet das Vormittag (AM).

Einstellen der Weckrufzeit–

Weckruf 1 einstellen

- Schieben Sie den **"ALARM SELECTOR" (12)** (Weckrufwählschalter) in die AL1-Position. Die Weckrufanzeige "AL1" (1) leuchtet auf.
 - Die **"ALARM SET /OFF"-Taste (5)** (Weckruf aktivieren / ausschalten) drücken und halten. Gleichzeitig die **"FAST"-Taste (9)** (Schnellaste) oder die **"SLOW"-Taste (10)** (Langsamaste) drücken, um die Anzeige bis zur gewünschten Uhrzeit vorzustellen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt für AM oder PM eingestellt ist.
- #### Weckruf 2 einstellen
- Nachdem der AL1-Weckruf eingestellt wurde, schieben Sie den **"ALARM SELECTOR" (12)** (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position. Die Weckrufanzeige "AL2" (17) leuchtet auf.
 - Schieben Sie den **"ALARM SELECTOR" (12)** (Weckrufwählschalter) in die AL2- Position. Die Weckrufanzeige "AL2" (17) leuchtet auf.
 - Die **"ALARM SET /OFF"-Taste (5)** (Weckruf aktivieren / ausschalten) drücken und halten. Gleichzeitig die **"FAST"-Taste (9)** (Schnellaste) oder die **"SLOW"-Taste (10)** (Langsamaste) drücken, um die Anzeige bis zur gewünschten Uhrzeit vorzustellen.

Auswahl des 12 oder 24 Stunden-Formats–

Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste (9)** sechs Sekunden lang, um auf den Formatauswahlmodus zuzugreifen. Geben Sie die **Uhrzeitaste (9)** frei, wenn "12H" oder "24H" auf der Anzeige erscheint. Drücken und geben Sie die Uhrzeitaste frei, um zwischen den Formaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln. Wird innerhalb von vier Sekunden keine Auswahl getroffen, wird das zuletzt angezeigte Format übernommen und die Anzeige kehrt in den normalen zeitmodus zurück.

Weckruf –

Weckrufe aktivieren:

- Schieben Sie den **"ALARM SELECTOR" (12)** (Weckrufwählschalter) in die AL1-Position, um Weckruf 1 zu aktivieren. Die Weckrufanzeige "AL1" (1) leuchtet auf.
- Schieben Sie den **"ALARM SELECTOR" (12)** (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position, um Weckruf 2 zu aktivieren. Die Weckrufanzeige "AL2" (17) leuchtet auf.
- Sollen beide Weckrufe aktiviert werden, schieben Sie den **"ALARM SELECTOR" (12)** (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position. Die Weckrufanzeigen "AL1" (1) und "AL2" (17) leuchten auf.

Auswahl des Aufwachmodus

Zur Auswahl des Aufwachmodus schieben Sie den "Weckrufmodussschalter"

(1) in die von Ihnen gewünschte Position:

- "BUZZ" (Summen) für Ton
- "VIB" für Bettschüttler
- "VIB/ BUZZ" für sowohl Ton als auch Bettschüttler

HINWEIS: Nachdem ein Aufwachmodus gewählt wurde, gilt er für beide Weckrufe.

Weckruffschemata –

Bei aktiviertem Weckruf sind die Schemata des Summers / der Blinklichtanzeige nicht mehr synchron mit dem Vibrator. Dies bedeutet, wenn Summer / Blinklichtanzeige eingeschaltet ist (ON), ist der Vibrator ausgeschaltet (OFF), und wenn Summer/ Blinklichtanzeige ausgeschaltet ist (OFF), ist der Vibrator eingeschaltet (ON).

ALARM 1 - Wenn Weckruf 1 aktiviert ist, gibt er drei Summtöne ab, gefolgt von Vibration.

Das Schema wird so oft wiederholt, bis der Weckruf gestoppt wird.

ALARM 2 - Wenn Weckruf 2 aktiviert ist, gibt er vier Summtöne ab, gefolgt von Vibration.

Das Schema wird so oft wiederholt, bis der Weckruf gestoppt wird.

Einstellen der Dauer des Weckrufs –

Die voreingestellte Dauer des Weckrufs beträgt 30 Minuten. können jedoch die Dauer nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 59 Minuten einstellen. Einstellen der Weckruffdauer:

- Drücken und halten Sie die Taste AL. SET sechs Sekunden lang. Die Uhrenanzeige blendet die voreingestellte Weckruffdauer mit '30' ein.
- Drücken Sie die Taste **"MIN" (10)** zur Einstellung der gewünschten Weckruffdauer von 1 Minute bis 59 Minuten.
- Wenn in der Anzeige die gewünschte Weckruffdauer erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Weckruffdauer ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Schlummerbetrieb –

Wenn der Wecker morgens aktiviert wird, können Sie die **Schlummertaste (3)** drücken, um den Weckruf vorläufig auszustellen. Der Weckruf bleibt 7 Minuten lang oder über den von Ihnen gewählten Zeitraum von einer bis 30 Minuten deaktiviert, und wird dann wieder aktiviert. Der Schlummerbetrieb kann unbegrenzt oft wiederholt werden, bis der Weckruf endgültig ausgeschaltet wird.

Einstellen der Schlummerzeit –

Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 7 Minuten. Sie können jedoch die Schlummerzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 30 Minuten einstellen. Einstellen der Schlummerzeit:

- Drücken und halten Sie die **Schlummertaste (3)** vier Sekunden lang. Die Uhrenanzeige zeigt die voreingestellte Schlummerzeit '7'.
- Drücken Sie die Taste **"MIN" (10)** zur Einstellung der gewünschten Schlummerzeit von 1 Minute bis 30 Minuten.
- Wenn in der Anzeige die gewünschte Schlummerzeit erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Schlummerzeit ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Abschalten des Weckrufs –

Der Weckruf kann temporär für den Tag oder permanent abgeschaltet werden.

- Wenn der Weckruf ertönt, einfach die Taste **"AL OFF" (7)** drücken. Der Weckruf schaltet sich selbst für den Tag aus und ertönt am nächsten Tag wieder zur gleichen Zeit, sofern die Weckzeit nicht geändert wurde.
- Um den Weckruf permanent abzuschalten, schieben Sie den **Funktionsschalter (8)** in die Aus-Position. Der Weckruf ertönt erst dann wieder, wenn der **Funktionsschalter (8)** auf "VIB", "BUZZ" oder "VIB/BUZZ" gestellt wird.

Dimmerbetrieb –

Sie können die Helligkeit der LED-Anzeige steuern. Drücken Sie ein Mal auf die Schlummertaste, um die Helligkeit der Anzeige zu ändern. Die Helligkeit wechselt zyklisch von hell (5) nach gedämpft (1) und wieder zurück.

HINWEIS: Die Dimmerfunktion ist im Schlummermodus deaktiviert.

Weckruf –

Die gewünschte Weckzeit einstellen und den **VIB/BUZZ/OFF-Schalter (8)** in die gewünschte Position schieben. Für Bettvibrator auf VIB, für Weckruf auf BUZZ oder für beide Funktionen auf VIB/BUZZ schieben.

Weckton –

Um den Weckton einzustellen, am **Wecktonregler (14)** rechts am Wecker, unter dem **Lautstärkeregler (4)** drehen, bis das gewünschte Level erreicht ist.

Lautstärke –

Um die Lautstärke einzustellen, am **Lautstärkeregler (14)** oben rechts am Wecker drehen.

Bettvibrator/Vibrator – Abbildung B –

- Den Bettvibratoranschluss an der Rückseite des Weckers am Anschluss **VIBRATOR-Eingang (15)** einstecken.
- Um den Vibrator zu aktivieren, den **Funktionsschalter (8)** auf VIB oder VIB/BUZZ schieben.
- Den Vibrator unter die Matratze oder das Kissen legen.

Batterie-Backup –

Um die Backup-Batterie zu verwenden, eine 9-Volt-Alkalibatterie an der Rückseite des Weckers unter der **Batteriefachabdeckung (11)** einlegen. Batterie im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte beachten Sie, dass auf der LED-Anzeige zwar während eines Stromausfalls nichts angezeigt wird, die Uhr jedoch korrekt weiterläuft, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Bei Stromausfall reichen die Alkalibatterien nur für eine Betriebsdauer von bis zu 30 Tagen. (Bei Stromausfall zeigt die LED-Anzeige nicht die Uhrzeit an.)

HINWEIS: Für beste Ergebnisse wird empfohlen, dass die Batterie alle sechs bis acht Monate ausgewechselt wird. Wenn der Wecker längere Zeit nicht verwendet wird, sollte die Batterie heraus genommen werden, damit sie nicht auslaufen kann.

DC 9V –Eingang –


Den Netzanschlusstecker an der Seite des Weckers am Anschluss **DC9V IN (13)** neben dem **VIBRATOR-Eingang (15)** anschließen; dies ist der kleinere der beiden. **Wichtig:** Netzeingang nicht mit Vibrator-Ausgang verwechseln.

ALLGEMEINE DATEN

Netzadapter

Eingang: 100-240V~, 50/60Hz

Ausgang: DC9V --- 0,65A / 5,85W

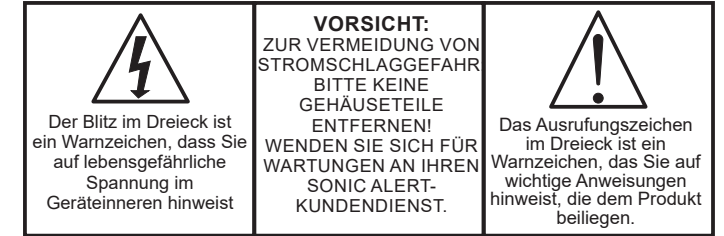

Der Blitz im Dreieck ist ein Warnzeichen, dass Sie auf lebensgefährliche Spannung im Geräteinneren hinweist

VORSICHT:
ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGEFAHR BITTE KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN!
WENDEN SIE SICH FÜR WARTUNGEN AN IHREN SONIC ALERT-KUNDENDIENST.

Das Ausrufungszeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf wichtige Anweisungen hinweist, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

RECYCLING VORSCHRIFT

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden. Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten :

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Geräts sollte der Händler das Altgerät annehmen. Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.

CE ERKLÄRUNG: Sonic Alert erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) 2014/30/EC und der Niederspannungsrichtlinie (LVC) 2014/35/EC. (falls zutreffend)

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden :

www.geemarc.com/de

Eine normale Funktion kann durch eine starke elektromagnetische Signalüberlagerungen (von anderen Geräeten) beeinflusst werden. Falls das eintritt versuchen Sie bitte das Geräet an einen anderen Platz zu stellen. Dann sollte es wieder normal funktionieren. Es koennt jedoch moeglich sein, dass Sie das Geräet wieder neu einstellen muessen. Folgen Sie dafür bitte den Anweisungen in der Anleitung.

2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON SONIC ALERT

Sonic Alert gewährt 2 Jahre Garantie für das Gerät. Von dieser Garantie sind unfälle, unsachgemäße bedienung oder mangelnde sorgfalt ausgeschlossen. Ihre rechte werden von dieser Sonic Alert garantie in keiner weise beeinträchtigt. Das produkt ist durch die gesetzliche garantie der konformität abgedeckt wie gesetzlich vorgesehen.

Wichtig: Ihr kaufbeleg ist teil der garantie und muss aufbewahrt und im garantiefall vorgelegt werden.

N° dienstservice: +49 (0) 228 548 89 932

GEEMARC TELECOM

Parc de l'etoile, 2 rue Gaillée, 59791 Grande Synthe Cedex, FRANCE



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

E-mail: kundendienst@geemarc.com

Telefon: +49(0)30 209 95 789

Parc de l'Etoile, 2 Rue Gaillée, 59791 Grande-Synthe, France.

Manufacturer: Sonic Alert 850 Stephenson Hwy., Suite 323, Troy MI

Von Geemarc Telecom im China hergestellt

093-HK009-060